



easypharm
ERAPATCH

*Fieberblasen-Pflaster
mit Hyaluronsäure*

- Mit Hyaluronsäure 0,5%
- 12 Stunden wirksam
- Unsichtbar, hypoallergen, überschminkbar
- Fördert die Wundheilung, lindert Juckreiz
- Reduziert das Infektionsrisiko



15 Stück

Medizinprodukt

ERAPATCH ist ein ultradünnes Pflaster zur direkten Anwendung auf der Lippe bei Fieberblasen. ERAPATCH besteht aus einer dünnen, durchsichtigen hypoallergenen Membran, die selbstklebend an der Lippe haftet. In der Membran ist Hyaluronsäure verteilt, die die Wunde mit Feuchtigkeit versorgt. Damit wird die Wundheilung bei Fieberblasen gefördert, der Juckreiz gelindert, eine Schutzbarriere gegen Umwelteinflüsse gebildet, das Infektionsrisiko reduziert und die Narbenbildung verbessert. Das Pflaster ist ca. 12 Stunden wirksam, unsichtbar und kann überschminkt werden.

Was ist Herpes Labialis?

Herpes Labialis ist eine Herpes-Simplex-Virus-Infektion, die als Ansammlung von Hautbläschen auf den Lippen auftritt. Diese Hautbläschen werden auch als „Fieberblasen“ bezeichnet.

Was sind die Symptome einer Herpes Labialis Erkrankung?

Erste Symptome sind ein warmes, prickelndes Gefühl auf der Lippe, sowie das Auftreten von rötlichen Flecken. Innerhalb weniger Stunden beginnen sich flüssigkeitsgefüllte Blasen zu bilden. Auslöser von Fieberblasen können schlechte Immunlage, Fieber, Menstruation, Stress, starke Sonneneinstrahlung oder der Verzehr bestimmter Lebensmittel sein. Fieberblasen können immer wieder auftreten, da das Virus nach der Erstinfektion im Körper weiterlebt und

durch die o.a. Auslöser wieder aktiviert werden kann.

Was sollten Sie bei Herpes Labialis beachten?

Vermeiden Sie bei akuten Fieberblasen Lippen-Kontakt mit anderen Menschen, bis die Blasen vollständig abgeheilt sind. Herpes labialis ist hoch ansteckend! Vermeiden Sie sehr warme oder sehr kalte Lebensmittel, da diese die betroffenen Hautstellen reizen können.

Wie wirkt ERAPATCH?

Die weiche Polyurethanscheibe des Pflasters ist mit einem hypoallergenen Klebstoff behandelt, in dem Hyaluronsäure verteilt ist. Hyaluronsäure besitzt die Fähigkeit, große Mengen an Wasser zu speichern, wodurch sich unter dem Pflaster entsprechend Feuchtigkeit

bildet, die während 12 Stunden die Wundheilung fördert und Juckreiz lindert. Zusätzlich bildet das Pflaster eine Schutzbarriere gegen Umgebungseinflüsse, dadurch kann das Infektionsrisiko reduziert werden und die Haut vor Narbenbildung geschützt werden.

Anwendung:

Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie das Pflaster anwenden. Stellen Sie sicher, dass sich auf der betroffenen Stelle keinerlei Reste von Cremes befinden und die Haut trocken ist, damit das Pflaster gut haftet. Öffnen Sie die Schutzhülle und ziehen Sie das Pflaster heraus, indem Sie die gegenüberliegende Kante der Halterung anheben (siehe Abbildung). Legen Sie die Hälfte des Pflasters auf die betroffene Stelle und geben Sie die andere Hälfte frei, damit das Pflaster vollständig auf der Fieberblase haftet.

Tragen Sie das Pflaster, bis es sich von selbst löst. Wiederholen Sie die Anwendung, bis die Fieberblase abgeheilt ist. Bei schwerwiegenden Zwischenfällen sind der Hersteller und die zuständige Behörde zu benachrichtigen. Dieses Medizinprodukt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Warnhinweise:

- Kann allergische Reaktionen auslösen
- Bitte bewahren Sie die Packung auf, um diese gegebenenfalls einem Arzt zeigen zu können
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren

Verpackung:

Eine Packung enthält 15 Fieberblasenpflaster.
Trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgen Sie dieses Medizinprodukt und seine Verpackung nicht in der Umwelt.



Eurosirel S.p.A.
Viale Europa, 30
20047 Cusago (MI)
Italien
Rev06 – 2023



Vertrieb:

Easypharm OTC GmbH
Mariahilfer Straße 116, Top 6. OG
A-1070 Wien
Österreich

